


bebè®

Una procedura codificata è assolutamente necessaria per assicurare l'identificazione del neonato al momento della nascita e durante la degenza. Il nostro sistema di identificazione evita lo scambio neonati avendo elementi identificativi univoci puerpera-neonato.

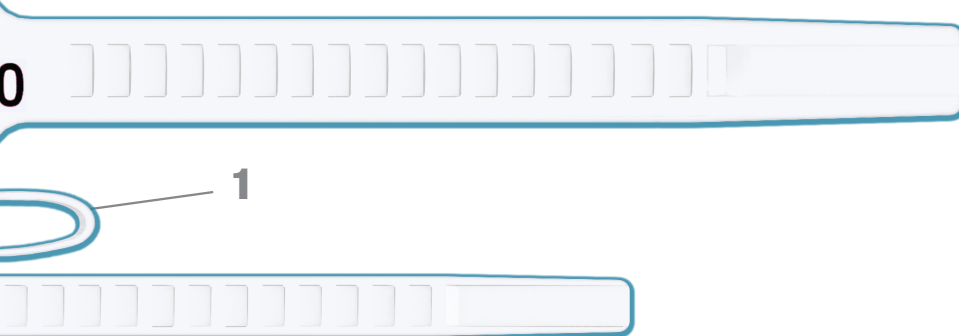


DIMENSIONI REALI

“Lo stesso numero progressivo di identificazione **3** viene riportato sul registro nascita insieme ai dati relativi all'evento nonché sulle cartelle cliniche della puerpera e del neonato.” (Operazione facilitata utilizzando adesivi prenumerati in corredo al Mammabebè)

“Ogni punto nascita può, a propria discrezione, aggiungere oltre al numero progressivo, altri elementi identificativi” (dati relativi alla puerpera, **4** data di nascita del neonato, ecc..)

Distribuito da:

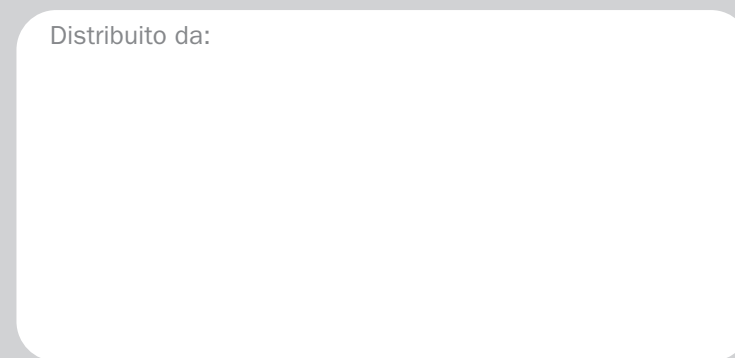

mammabebè®

Identificazione neonatale ed ospedaliera



Prodotto da:

FD di Franceschini Sabrina & C. s.a.s.

Via Isei, 11 - 47521 CESENA (FC) - Italy

Tel. 0547 29068 - Fax 0547 25655

<http://www.fd-identificazione.it> - E-mail: info@fd-identificazione.it

Skype: [sabrina.franceschini.fd](https://www.skype.com/name/sabrina.franceschini.fd)

mammabebè®

“La nascita è forse nella sua semplicità la più grande e festosa espressione dell'umanità. L'identità e l'appartenenza concessa dal destino è un diritto a cui non si può rimanere indifferenti.”

dal 1959 i primi produttori al mondo di Bracciali Identificativi Neonatali


L'unico bracciale restringibile dopo il calo fisiologico del neonato nelle 24 ore successive alla nascita

Personalizziamo i confezionamenti assecondando le esigenze ospedaliere anche con **RFID**

Pensato e prodotto in Italia



mamma

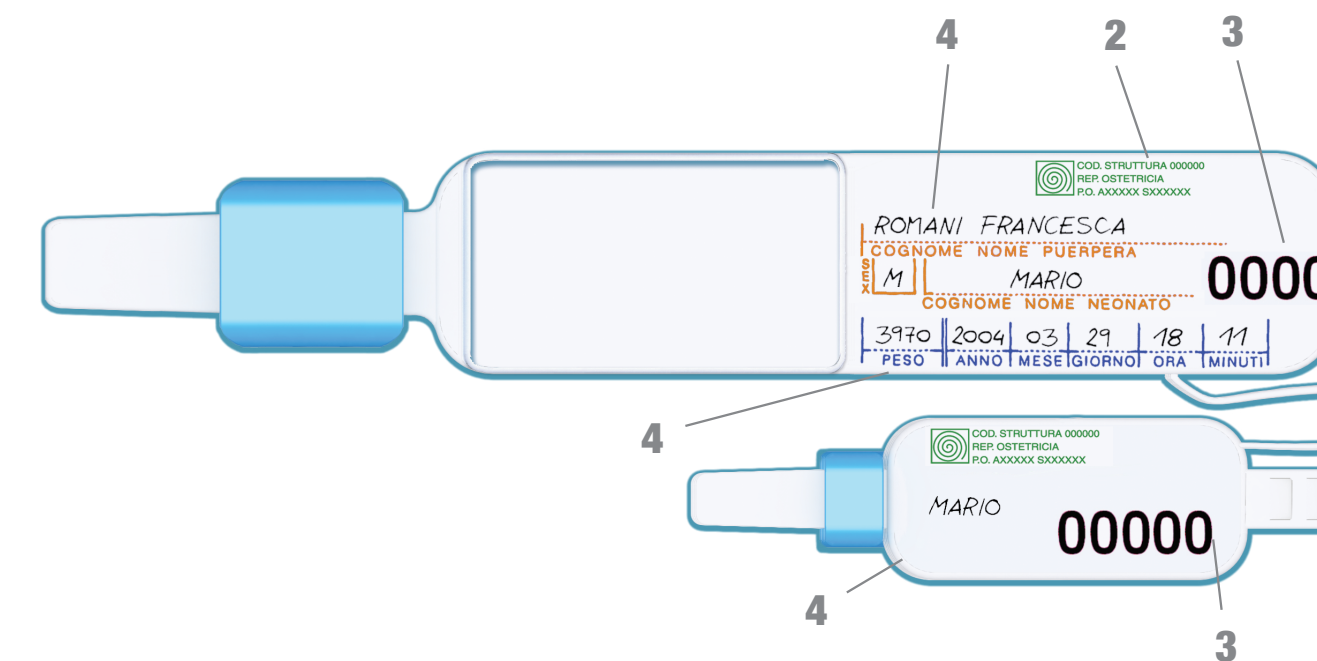

“I due braccialetti **1** originariamente uniti vengono separati e applicati a puerpera e neonato subito dopo il parto*”

“Ad ogni puerpera e neonato viene applicato un bracciale che riporti oltre al codice identificativo della struttura, **2** lo stesso numero progressivo identificativo **3** prestampato.”

* Frasi o periodi estratti dalla Gazzetta Ufficiale Italiana del 23 Gennaio 2002

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 19 del 23 gennaio 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 25-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 gennaio 2002

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 65081

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Ufficio V

Linee guida sulle modalità per l'identificazione del neonato al momento della nascita

23-1-2002 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
UFFICIO V

Linee Guida sulle modalità per l'identificazione del neonato al momento della nascita

Nella maggior parte dei punti nascita, specie in quelli presenti nelle grandi strutture, è già in uso il sistema di identificare il neonato mediante l'utilizzo di bracciali per la puerpera e per il neonato, recanti elementi identificativi puerpera-neonato atti ad individuare la diade.

Al fine di evitare il verificarsi dello scambio di neonati appare necessario promuovere ed assicurare l'identificazione del neonato al momento della nascita e durante la degenza, con procedure che non lascino adito a possibili errori utilizzando la tecnica del braccialetto.


E' indispensabile che siano dichiarate e descritte, nella carta dei servizi dell'Azienda e dell'Unità Operativa ed esposte in maniera ben visibile, in ogni "punto nascita" pubblico e privato, le modalità della procedura dell'applicazione contemporanea dei braccialetti al neonato e alla puerpera, con l'indicazione degli operatori responsabili di questo atto, come specificato di seguito:

- Ad ogni puerpera e neonato dovrà essere applicato un braccialetto che riporti oltre al codice identificativo della struttura, **2** lo stesso numero progressivo identificativo **3** prestampato. **1** I due braccialetti, originariamente uniti e di misura differente verranno separati e applicati a puerpera e neonato (al polso o preferibilmente alla caviglia del neonato) subito dopo il parto, spontaneo o operativo e comunque all'interno della sala parto o della sala operatoria. Ogni punto nascita potrà, a propria discrezione, aggiungere, oltre al numero progressivo, altri elementi identificativi (dati relativi alla puerpera, **4** data di nascita del neonato, ecc.)
- In caso di parto plurimo ogni neonato avrà un braccialetto con numero progressivo, corrispondente alla cronologia della nascita, sul quale sarà riportato l'ordine di genitura. Alla puerpera verrà applicato il corrispondente braccialetto per ogni neonato.

mammabebè®

VERSATILITÀ IN BASE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE SANITARIE

A versione standard

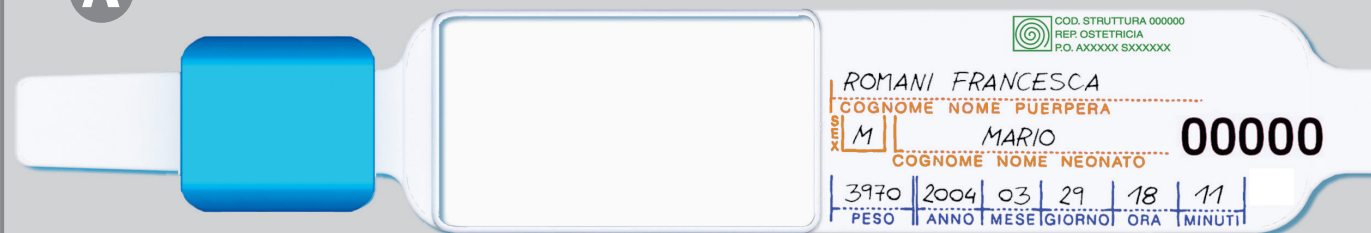


B per Strutture che utilizzano sistema identificativo con codice a barre

L'adesivo è protetto da un bordo di protezione dall'usura degli indumenti



C Per Strutture che utilizzano il Tag Rfid.

Il Tag è protetto da una speciale etichetta adesiva protettiva antimanomissione*.

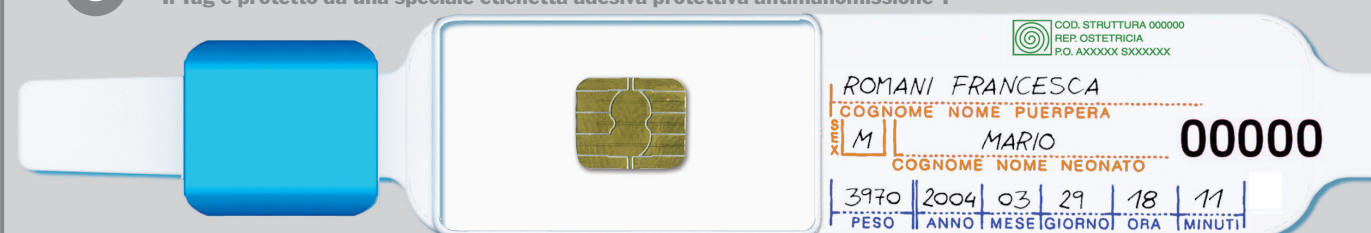

Evitare lo scambio dei neonati e garantire il riconoscimento era l'imperativo categorico di uno studio portato a termine dalla ns. Società nel 1959 con la produzione del sistema "mammabebè" che andava a sopperire ad una mancanza di supporti tecnologici.

Dal primo brevetto del 1959 di un supporto tecnologico in materia plastica all'ultimo di un sistema integrato di identificazione, 65 anni di ricerca e sviluppo dei prodotti a fianco delle varie Strutture Sanitarie che nel tempo ci hanno permesso di essere la Società Leader del settore.

Identificare il neonato e la puerpera è l'imperativo da cui si parte per individuare l'oggetto identificativo: un duplice bracciale con identica numerazione progressiva, realizzato in morbida plastica con bordi arrotondati legati l'uno all'altro da un sottile cordone che si staccherà dal polso della mamma al momento della nascita del bambino.

In tale modo si potrà avere la tranquillità dovuta alla certezza del controllo sia del personale sanitario che della puerpera con la verifica immediata e visiva della identica numerazione progressiva sui due bracciali. Tale numerazione è sequenziale e in ordine crescente nelle confezioni dispenser.

Chiusura di sicurezza con clips progettate e realizzate in materiale plastico rigido per una amovibilità rispondente ai duri rapporti di prova e verifiche fatte dalla nostra Azienda. Adattabilità al polso come caratteristica di unicità del nostro sistema per dare la possibilità di restringimento al bracciale del neonato dopo il calo fisiologico.

L'ultimo sistema che recepisce tutte le indicazioni e le esperienze maturate negli anni consente con i suoi spazi razionalmente messi a disposizione per aggiungere dati e fungere da supporto per l'informatizzazione con il codice a barre o Tag Rfid.

Componenti, materiali e procedimenti produttivi codificati e certificati:

- materiali plastici atossici, allergici e "latex free";
- sicurezza delle scritte all'usura e ai liquidi;
- certificato le caratteristiche di trazione allo strappo;
- personalizzazione di tutte le caratteristiche variabili.

Il "mammabebè" nasce per dare tranquillità alle persone che partecipano con coscienza civile e che vogliono dare sicurezza di diritti a bambini e genitori al momento della nascita.

Materiali termoplastici:

Speciale Polivinilcloruro plastificato alimentare certificato.

latex free

Direttiva CEE 677/584 Legge N.256/74

Informazioni sulla tossicità: Nessun effetto tossicologico sulla salute; il materiale è anallergico e atossico.

Certificazioni: ISTITUTO GIORDANO Centro Politecnico di Ricerche e Certificazioni

Rapporto di prova N. 149221-EN ISO 527-1 del 1996 Determinazione delle caratteristiche a trazione (strappo) su sistemi di identificazione neonati e puerpere con supporto a bracciale in materiale termoplastico monouso. Trazione e strappo N 301,392=Kg30,72 N 164,71=Kg16,79.

Rapporto di prova N. 145306-EN ISO 527-1 del 1996 Prova ciclica dello sfregamento per la valutazione dell'usura della superficie dei braccialetti. Usura irrilevante dopo 140.000 sfregamenti.

Rapporto di prova N. 145912 UNI ISO 175 Resistenza a prodotti vari (chimici e commerciali) Determinazione dell'effetto dei prodotti chimici su bracciali per l'identificazione neonato

e puerpera secondo la norma UNI ISO 175 immersi per 240 ore a 20° in acqua, sudore acido, sudore basico, olio, detergente, alcool denaturato, acido cloridrico 10%, acido acetico 10%, acido citrico 10%, in soluzione acquosa, Non mostrano alcuna variazione di aspetto.

Certificazione della atossicità della Stampa. Scheda sicurezza prodotto: FOIL MEDICALE atossico e anallergico a trasferimento termico.

Disponibili su richiesta le stampe delle certificazioni elencate.

Leggi sulla identificazione nella sanità pubblica Dir. P.C.M. 27 Gennaio 1994 D.L. 12 Maggio 1995 D.P.C.M. 19 Maggio 1995

Carta dei servizi pubblici sanitari Art.2 "... il diritto di essere individuato sempre con il proprio nome e cognome..." Art. 85-86-89 "...la tutela del parto..."


Gazzetta Ufficiale n.19 del 23-1-2002

"Linee guida sulle modalità per l'identificazione del neonato al momento della nascita"


mammabebè®

SET COMPONENTE L'UNITÀ IDENTIFICATIVA

- 1 mammabebè prestampato numerato e personalizzato
- 5 Adesivi prenumerati e personalizzati
- 1 penna speciale indelebile 1/100 pz

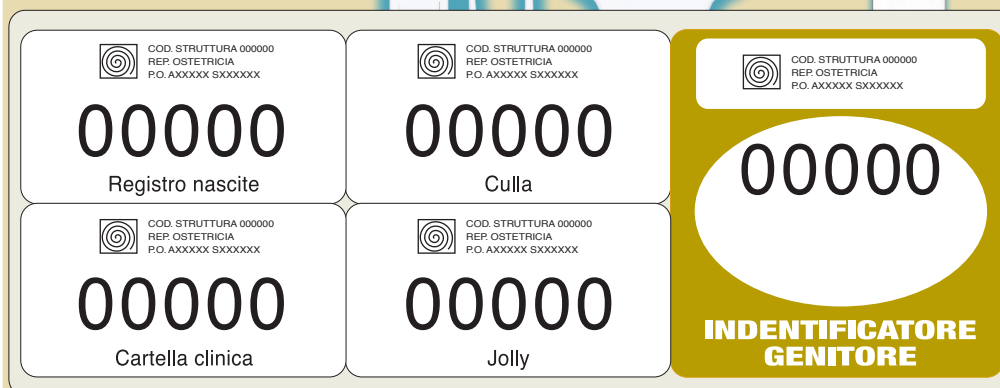

mammabebè è disponibile nei seguenti colori:

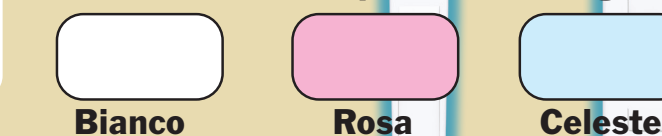

mammabebè®

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE STANDARD

- n° 200 mammabebè numerati progressivamente
- n° 200 kits di 5 adesivi numerati e personalizzati
- n° 2 pennarelli speciali indelebili



Confezione Dispenser da 200 mammabebè numerati progressivamente e personalizzati, disposti longitudinalmente in strati da 5 pezzi, intermezziati da polietilene espanso, con 200 kits da 5 adesivi numerati e personalizzati come il mammabebè, con 2 pennarelli speciali indelebili per scritte manuali. Il tutto sigillato e cellophanato in modo da garantire l'igienicità originale nel tempo e l'inviolabilità del contenuto rigorosamente sigillato fino al reparto di utilizzo.